


Näin teet virtsan hajotusviljelyn

1. 10 µl silmukka kastetaan virtsaan. Varmista, että silmukkaan todella jää näytettä, eikä vain ohutta kalvoa.
2. Silmukalla vedetään ensimmäinen siirrostus maljan päästä päähän kääntäen silmukkaa suuntaa vaihtaessa. Näytteen tulisi jäädä viivaksi keskelle.
3. Sen jälkeen vedetään siirrostusviivoihin nähden poikittain tiheä siksak-kuvio koko maljan alueelta reunasta reunaan. Hajotus tehdään puoli maljaa kerrallaan ja käännetään välissä.
4. Maljaa inkuboidaan kansi alaspäin +35–37°C 18–20 tuntia.

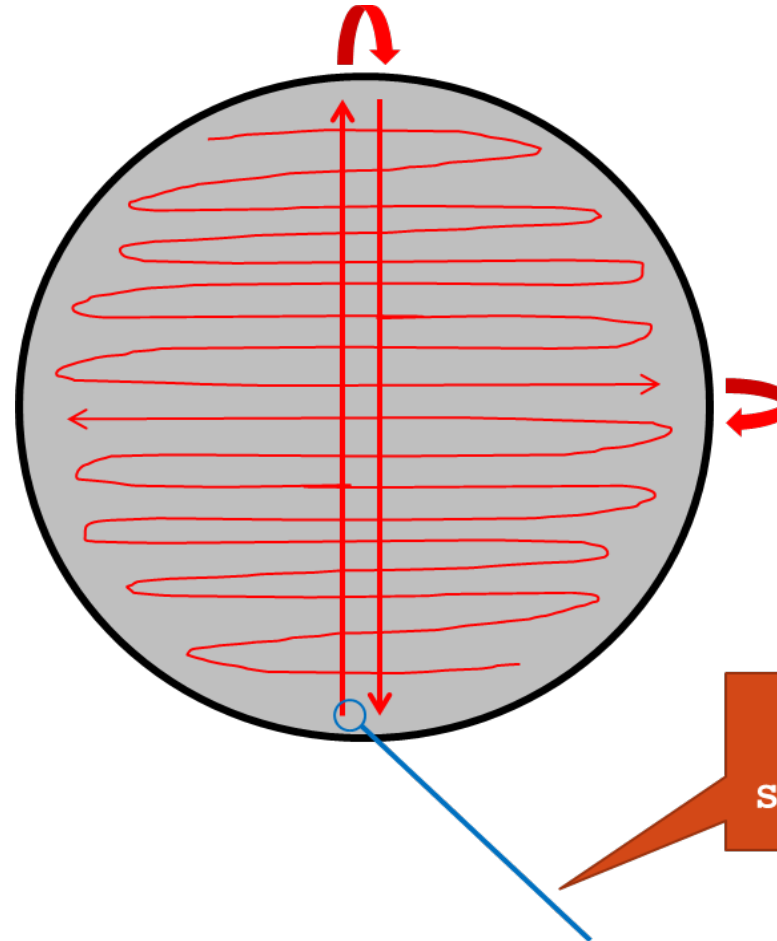

10 µl
silmukka

Muista!

- ✓ Tarkista maljan voimassaolopäivä ennen viljelyä.
- ✓ Merkitse maljaan omistajan ja lemmikin nimi, näytteenottopäivä sekä näytteenottotapa.
- ✓ Kiinnitä kansi maljaan parafilmillä ennen lähettämistä.



HELSINGIN YLIOPISTO
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

